



1 Posición


El parche Zio se coloca en el lado superior izquierdo del pecho del paciente. Encuentre la parte más plana justo debajo de la clavícula, con la flecha apuntando hacia arriba.

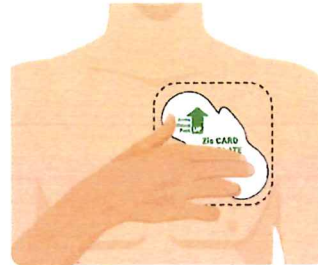


2 Preparación de la Piel

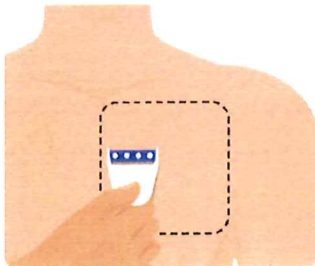

Afeite si hay pelo.

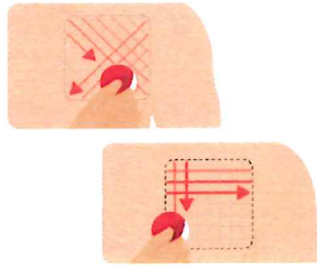


Sujete el disco abrasivo (abrader) por la lengüeta naranja y frote el abrasivo 40X, diez veces en cada dirección.

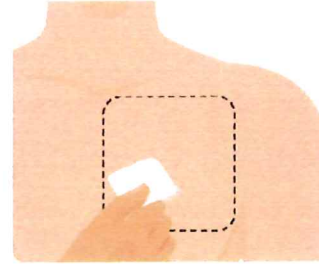

Limpie bien el área de preparación con las 4 toallitas con alcohol. Deje secar durante un minuto.


3 Aplique el parche Zio AT

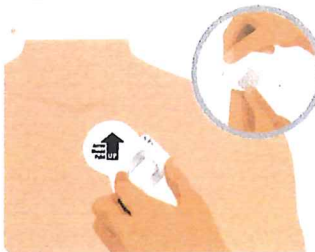


Retire el parche Zio de la bolsita de aluminio. Sostenga el centro del parche Zio y retire las cubiertas protectoras transparentes.



Encuentre la ubicación mencionada en el primer paso. Presione con firmeza sobre la piel como muestra la figura durante 2 minutos.

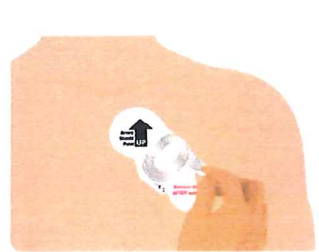

Pele la etiqueta blanca comenzando con "1" y luego "2". Luego presione con firmeza en el parche durante otros dos minutos.

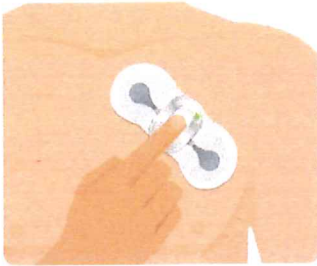4 Activar parche y transmisor (gateway)


Presione el botón en el centro del parche. La luz verde se encenderá intermitentemente y luego se apagará. Esto indica que ha comenzado el monitoreo.



Abra el transmisor y presione el botón de estrella. Las luces se encenderán en naranja y luego en verde. Cuando se apagan, el transmisor está conectado al parche.



Mantenga el transmisor a menos de 10 pies de su pecho para asegurarse de que pueda permanecer conectado continuamente para transmitir datos.

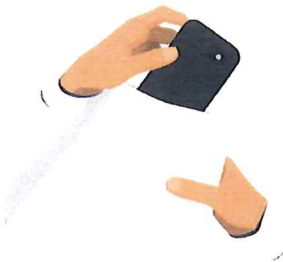5 Fin de uso: quite el parche, devuelva parche y transmisor

Al final del período de uso, quite el parche del paciente y devuelva el parche y el transmisor usando el sobre con correo prepago que se proporciona dentro del transmisor.

Clinica: No olvide registrar al paciente en ZioSuite.

Para obtener instrucciones completas, consulte las Instrucciones de aplicación de Zio AT que se proporcionan con el monitor Zio AT.



iRhythm Technologies 699 8th Street, Suite 600, San Francisco, CA 94103
©2020 iRhythm Technologies, Inc. All rights reserved.
Traducción de ALB0035.01
irhythmtech.com

Atención al cliente

 **1.888.693.2401**